



WipeClean Alco Free Disinfection

Desinfektionsservett



CE
2797

Alkoholfri desinfektionsduk för desinficering av ytor och medicinteknisk utrustning (CE-märkt).

Användningsområde

För desinficering av ytor som tål våttorkning och icke-invasiva medicinska utrustningar inom hälso- och sjukvården, för professionellt bruk. Klassifikation förutom status för medicinska produkter: PT2 och PT4 biocidprodukt för professionellt bruk.

Lämplig att användas på material som inte tål alkohol. Rekommenderas inte för ytor av naturgummi och kartong. Kontrollera produkttillverkarens anvisningar om desinficering innan du använder dukarna.

Produktegenskaper

Fibertygsduk, 50 gsm 100 % polyester, frigör effektivt desinfektionsmedlet för bruk. Det mjuka, lagom tjocka dukmaterialet rengör och fuktar ytor som ska desinficeras enkelt och snabbt. Innehåller de aktiva substanserna DDAC och Triamin som ger produkten samma höga effektivitet som desinfektion med alkohol. Oparfymrad. Dukarna är designade för att lämna ett tunt skikt av vätska kvar på ytan. På så sätt uppnås bästa möjliga desinfektionseffekt.

WipeClean Alco Free Wipes finns i följande storlekar:

5203 Liten: 20 x 30 cm, räcker till 1 m²

5204 Stor: 30 x 40 cm, räcker till 2,5 m²

Förpackningen är enkel att öppna och återförsluta. Dukarna är förpackade i lufttät förpackning med enkel förslutning som säkerställer att de inte torkar ut. På locket finns plats för att anteckna datum när förpackningen öppnades. Efter att förpackningen öppnats får dukarna användas i högst 6 månader.

Uppfyller kraven i EN14885 och har dokumenterad bactericidal-, mykobaktericidal, fungicidal-, virucidal- (inklusive Coronavirus) och sporicidal effekt.

Bruksanvisning

Dukarna är klara att använda och ska användas på rengjorda och torra ytor. Fukta ytan med duken enligt kontakttid angiven på förpackningen för optimal effekt. Släng den använda duken. Kräver ingen efterbehandling eller sköljning med vatten. Stäng alltid förpackningen efter användning. Ej avsedd för handhygien. Använd handskar i enlighet med EN374.

Test standard		Test organism	Kontakt tid
EN16615 EN13727	Bactericidal	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13697	Bactericidal	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min
EN13624	Fungicidal	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13624 EN13697 EN16615	Yeasticidal	C. albicans	1 min
EN14348	Mycobactericidal	M. terrae M. avium	1 min
EN14476	Limited spectrum virucidal activity	Adenovirus M. norovirus	1 min
EN14476	Virucidal	Poliovirus Adenovirus M. norovirus	2 min
EN13704	Sporicidal	B. subtilis B. cereus C. difficile	1 min
EN13704	Sporicidal	C. sporogenes	2 min

Sammansättning

Aktiva ämen		Effekt
DDAC	6,4 g/kg	desinfektionsmedel
Triamine	5,31 g/kg	desinfektionsmedel

Förvaring

Förvara förpackningen i ett torrt, frostfritt utrymme och ej i direkt solljus. I rumstemperatur, tre år. Öppnad förpackning i 6 månader.

Utseende och doft

Duken är vit, gjord av polyester, samt färg- och parfymfri.

Tillverkningsland

STORBRITANNIEN

Användar- och miljösäkerhet

Rekommenderas inte för ytor av naturgummi och kartong. Kontrollera produkttillverkarens anvisningar om desinficering innan du använder dukarna. Använd skyddshandskar.

Allvarliga tillbud orsakade av Alco Free Wipes desinfektionsservetter ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Duken är gjord av polyester. Förpackningens yttre hölje är gjort av pet/pe-plast. Både förpackningen och dukarna är energi- eller samhällsavfall.

Förpackningsmaterial

Våra produkters förpackningar är gjorda av plast och kartong, som är återvinningsbara material. På www.kiilto.se kan du läsa mer om våra förpackningar och hur de kan återvinnas.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
-----------------------------------	----------------	------------	------	------------

12 x 20 st		5204	5701684520420	5701684520413
------------	--	------	---------------	---------------

20 x 25 st		5203	5701684520321	5701684520314
------------	--	------	---------------	---------------

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.